


# TEÑIDORA TD-1000

## Manual de instrucciones

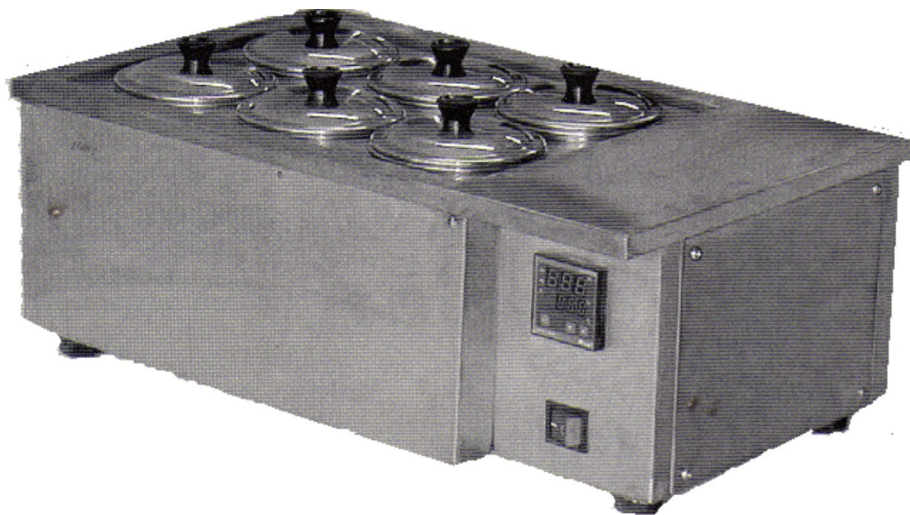

TD-1000

# **TEÑIDORA TD-1000**

## **Manual de Instrucciones**

### Índice

Precauciones.....	1
<b>1. Nomenclatura</b>	
1.1 Nombre de las partes.....	1
1.2 Accesorios.....	2
<b>2. Instrucciones de operación</b>	
2.1 Instrucciones de operación.....	2
2.2 Precauciones.....	3

Gracias por adquirir esta eficaz Unidad de Tintura.


Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente para hacer un mejor uso del instrumento.


### Precaución

1. No use soluciones químicas para realizar la limpieza, de lo contrario podría dañar la máquina.
2. No use la maquina en lugares mojados.
3. Durante la operación de la máquina, manténgase lejos de la carcasa para evitar quemaduras
4. La máquina no debe ser operada por personas que no estén familiarizadas con su funcionamiento.
5. No mantenga la máquina encendida sin agua desmineralizada.
6. Se necesita conexión a tierra en la toma corriente donde se conecte este equipo.
7. El Fabricante no se responsabiliza por los daños ocasionados por el uso inapropiado de la máquina.


## 1. NOMENCLATURA

### 1.1 NOMBRE DE LAS PARTES

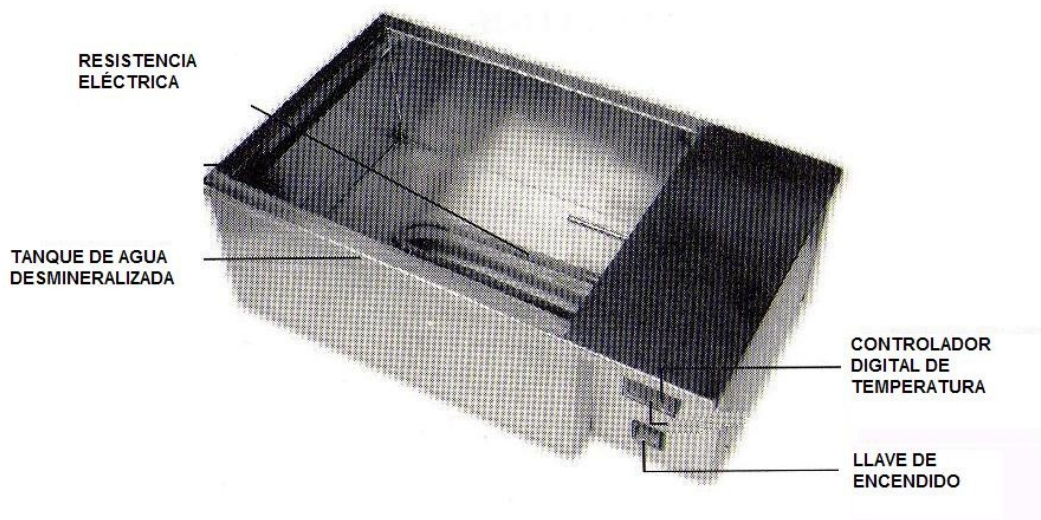

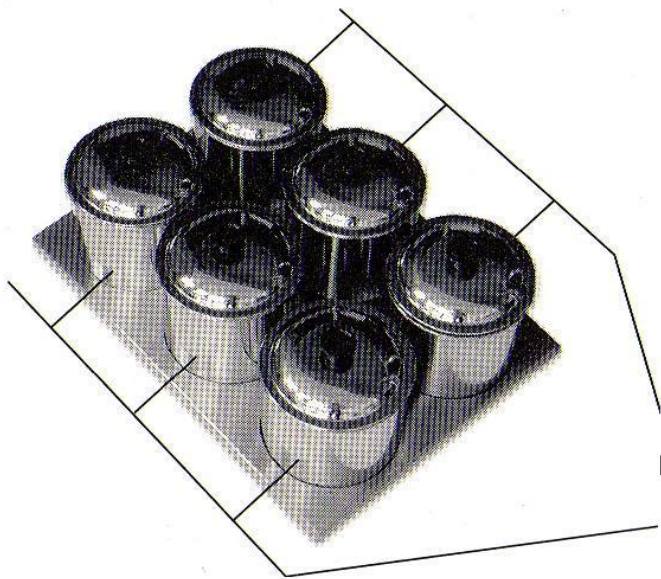

MINITANQUES (6)

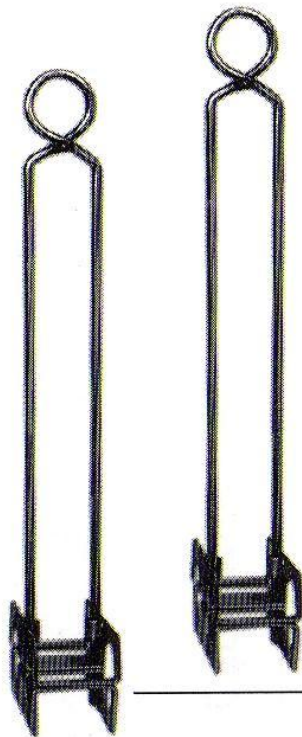

PINZAS (2)

## INSTRUCCIONES DE USO

### 2.1 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Desembale el equipo y conéctelo a una toma corriente que tenga descarga a tierra.
2. Llene con agua desmineralizada el tanque (7 lt.)
3. Añada el color en los mini tanques y añada la proporción de agua (600cm<sup>3</sup>)
4. Encienda la máquina.
5. Primero, presione la llave "Set", luego presione las teclas "up" o "down" para establecer la temperatura deseada. (Normalmente, la temperatura se establece en 92°C). Finalmente presione la llave "Set" para mantener la temperatura seleccionada.
6. Cuando el termómetro llega a la temperatura deseada, tome la lente con la pinza firmemente, y luego colóquelo en el mini tanque (la lente necesita estar completamente sumergida en el líquido de color). Determine el tiempo necesario de acuerdo a la intensidad del color que necesita.
7. En caso de que el color de la lente teñida sea demasiado intenso, usted puede disponer uno de los seis mini tanques del equipo para utilizarlo con neutralizador decolorante.

## 2.2 Precauciones

1. Verifique el tanque de agua periódicamente. El agua desmineralizada debe cubrir la resistencia eléctrica, y envolver por fuera a los mini tanques hasta 2/3 partes de su altura.

## 3.1 Diagrama de circuito.

